



Рукавички «ВОЛЕС» латексні припудрені одноразового використання нестерильні

Для одноразового застосування.



Інструкція з використання:

1. Відкрийте упаковку у зазначеному місці «Відкрити тут».
2. Дістаньте пару рукавичок.
3. Згідно встановлених технік одягання рукавичок, одягніть рукавички.
4. Зберігайте у сухому, чистому та захищеному від сонячних променів місці
5. Після закінчення процедури, рукавички необхідно утилізувати в установленому порядку

Попередження!

1. Не використовуйте після закінчення терміну придатності
2. Не використовуйте при порушенні цілісності зовнішньої упаковки
3. Тільки для одноразового використання
4. Рукавички не гарантують 100% захист рук від проколів та порізів
5. Необхідно замінити рукавички стерильні:
 - Кожні дві години безперервної роботи
 - Після виявлення видимого дефекту
 - Після можливого або дійсного проколу голкою, шовним матеріалом або кісткою
 - Після випадкового електричного удару від електрохірургічного інструменту
 - У випадку, коли рукавичка починає здуватися, розтягуватись, липнути або не щільно прилягати до руки
 - У відповідності до правил прийнятих ЛПЗ
6. Не обробляйте рукавички спиртовмісними речовинами!

Принцип лікувальної дії – не існує.

Умови зберігання



Зберігати в сухому та захищеному від сонця місці



Температура зберігання



Термін зберігання: – 5 років з дати виробництва.



Дата виробництва вказана на індивідуальній упаковці.

Уповноважений представник виробника в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛА МЕД»

Адреса: Україна. 04210 м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду 2-Г, корпус 1.

Тел.: (044) 3000-504.

e-mail: sale@lamed.com.ua,



Виробник: Fitone Latex Products Co., Ltd. Guangdong

Address: No. 5 Tongyi Road, Lingbei Industrial zone, Suixi, 524338 Zhanjiang, Guangdong, People's Republic of China

Дата останнього перегляду: 10.12.2020