



UA.TR.039

Тримач (холдер) "ВОЛЕС" для вакуумних пробірок

Інструкція по використанню

Призначення

Тримачі використовуються разом з пробірками для забору крові та голками, як система для забору венозної крові. Тримач стандартний призначений для фіксації пробірки під час забору венозної крові вакуумною пробіркою. Забезпечує безпечність та комфортність використання, медперсоналу і пацієнта при заборі крові.

Опис виробу

Стандартний тримач одноразового використання, нестерильний та вироблений з пластику, з центральним гвинтовим різьбленням в верхній частині тримача.

Сумісний з усіма типами двосторонніх голок, Луер-адаптером, катетер-метеликами. Має спеціальну різьбу для надійної фіксації голки. Матеріал - прозорий пластик

Спосіб використання

Попередження зворотного струму

Більшість вакуумних пробірок для забору зразків крові містить хімічні добавки. Тому важливо запобігати вірогідного зворотного струму з пробірки внаслідок можливості виникнення небажаних реакцій у пацієнтів. Для попередження зворотного струму з пробірки у руку пацієнту дотримуйтесь таких заходів безпеки:

1. Рука пацієнта має бути нахилена донизу.
2. Тримайте пробірку кришечкою вгору.
3. Ослабте джгут, як тільки кров почне текти у пробірку.
4. Переконайтеся, що вміст пробірки не торкається кришечки або кінця голки під час венепункції.

Техніка венепункції

НАДЯГАЙТЕ РУКАВИЧКИ ПІД ЧАС ВЕНЕПУНКЦІЇ ТА ОБРОБКИ ПРОБІРОК ДЛЯ ЗАБОРУ КРОВІ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ.

1. Зніміть ковпачок, щоб відкрити голку з клапаном.

ПРИМІТКА: Перфорована етикетка не тільки полегшує ідентифікацію, але також є показником стерильності та цілісності виробу. Якщо перфорація розірвана або пошкоджена, утилізуйте голку та оберіть іншу.

2. Вкрутіть голку у стандартний тримач. Переконайтесь, що голка щільно вставлена й не відгвинтиться під час використання.

ПРИМІТКА: Неправильне укручування голки в стандартний тримач може призвести до пошкодження різьблення тримача та / або голки. Це пошкодження може спричинити ослаблення голки під час венепункції.

3. Виберіть місце пункції. Накладіть джгут (максимум на 1 хвилину). Підготуйте місце венепункції, продезінфікувавши відповідним антисептиком. НЕ ПАЛЬПУЙТЕ МІСЦЕ ВЕНЕПУНКЦІЇ ПІСЛЯ ОБРОБКИ.
4. Помістити руку пацієнта трохи донизу. Зніміть захисний ковпачок з голки. Здійсніть венепункцію, упродовж якої рука знаходиться нижче кришечки пробірки.
5. Вставте пробірку у стандартний тримач та на клапан голки, проколовши гумову мембрану. Вставляйте пробірки у тримач по центру, коли проколюєте ковпачок, щоб запобігти проколювання бокової стінки й подальшої передчасної утрати вакууму.
6. ЗНІМІТЬ ДЖГУТ ЯК ТІЛЬКИ КРОВ ПОЧНЕ ПОСТУПАТИ У ПРОБІРКУ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ВМІСТУ ПРОБІРКИ КОНТАКТУВАТИ З КРИШЕЧКОЮ АБО КІНЦЕМ ГОЛКИ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ, тобто не за яких обставин пробірку не можна перевертати вверх дном під час



забору. Завжди фіксуйте пробірку, прижимаючи її великим пальцем, щоб забезпечити повний вакуумний забір.

ПРИМІТКА: Кров може випадково протекти через рукав голки. Використовуйте універсальні заходи безпеки, щоб мінімізувати ризики, пов'язані з дією зовнішніх факторів.

7. Приєднайте наступні пробірки до тримача. Переконайтесь, що під час збору крові вміст пробірки не контактує з ковпачком або кінцем голки.
8. Як тільки припиниться потік крові в останню пробірку, вийміть голку з вени, натиснувши на місце проколу сухим стерильним тампоном до припинення кровотечі. Після утворення тромбу накладіть пов'язку за бажанням. **НЕ ЗАКРИВАЙТЕ КОВПАЧОК.** Закривання голки ковпачком збільшує ризик поранення внаслідок необережного поводження та контакту з кров'ю.

ПРИМІТКА: Після венепункції верхня частина кришечки може містити залишки крові.

Додержуйте належних заходів безпеки при обробці пробірок, щоб запобігти контакту з цією кров'ю. Будь-який тримач голки, забруднений кров'ю, вважається небезпечним та має бути негайно видаленим.

9. Утилізуйте використаний тримач з голкою, використовуючи відповідний прилад для утилізації.

Утилізація

1. Слід враховувати та додержуватися загального керівництва з гігієни та правових норм щодо належної утилізації інфікованих матеріалів.
2. Одноразові рукавички запобігають ризику інфікування.
3. Забруднені або наповнені пробірки для забору крові слід утилізувати у придатних контейнерах для утилізації біологічно небезпечних відходів, які потім можна стерилізувати в автоклаві, а після останнього використання спалити.
4. Утилізація має відбуватися у підходящому пристрою для утилізації твердих побутових відходів або шляхом стерилізації в автоклаві (стерилізація паром).

Маркування на товарі:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.



Виробник:

Hangzhou Rollmed Co Ltd.

Room No.301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 Jiangdong Zhonglu Road, 210019 Nanjing, People's Republic Of China

Ганджоу Ролмед Ко., ЛТД

Рум №301-302, Гонгпуджізо Мансйон, 186-1 Джіянгдон Жонглю роад 210019 Наньїнг, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Дата останнього перегляду
01.12.2020

Шульга О. Л.