



UA.TR.039

## Аплікатор "ВОЛЕС", стерильний

### Інструкція по використанню

#### Призначення:

Аплікатор призначений для взяття, зберігання і транспортування зразків біологічного матеріалу в медичні установи для проведення лабораторних досліджень; взяття санітарних змивів; засівання матеріалу на рідкі та щільні поживні середовища та ін.

#### Опис виробу:

Аплікатор складається з двох основних елементів:

1. ось тампона, при виготовленні якої використовується дерево, алюмінієвий дріт або пластик
2. тампон, який виготовляють з віскози або бавовни.

Кожен з перерахованих матеріалів володіє своїми характерними особливостями, виходячи з яких і проводиться вибір того чи іншого аплікатора при проведенні дослідження.

Довжина аплікатора 150мм.

Кожен аплікатор індивідуально упакований, стерильний.

#### Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

#### Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

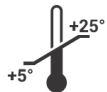
#### Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням.

#### Спосіб використання:

3. Виберіть аплікатор в залежності від завдань дослідження.
4. Розкрийте стерильну упаковку, витягніть аплікатор
5. В залежності від типу досліджування виконайте наступне:
  - а) для підготовки (очищення) місця взяття проби - зніміть з його допомогою надлишкове виділення;
  - б) для отримання матеріалу на цитологічне або бактеріологічне дослідження - візьміть мазок, нанесіть матеріал тонким шаром на предметне скло;
  - в) при засівання щільних поживних середовищ - відберіть на зонд культуру і нанесіть матеріал на щільне середовище штрихуванням;
  - г) для взяття біологічних проб для подальшого бактеріологічного дослідження - відберіть пробу і помістіть аплікатор в стерильну ємність порожню або з середовищем.
6. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

**Маркування на товарі:**

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

**Виробник:**

Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.

Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China

Джіангсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД

Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джіангсу, Китай

**Уповноважений представник виробника в Україні:**

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду  
02.12.2020

Директор  
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.