



Пробірка "ВОЛЕС" 16x100 мм

Інструкція по використанню

Призначення

Пробірки лабораторні призначені для проведення пробпідготовки: розведення проб, центрифугування, титрування тощо. Можуть використовуватися як вторинна пробірка при роботі з автоматичними аналізаторами і в ручних методах досліджень. Пробірки полімерні, одноразового застосування.

Опис виробу:

Пробірка виготовлена з полістиролу або з поліпропілену. Пробірки представляють собою вироби циліндричної або конічної форми, у яких діаметр набагато менше висоти. Круглодонні циліндричні пробірки є аналітичними, конічні пробірки - центрифужні. Пробірки можуть мати градувальні кільця або градування (графічну або рельєфну) і можуть бути з обідком, або без обідка. Пробірки можуть бути оснащені поліетиленовою пробкою або кришкою, та етикеткою.

№ п/п	Найменування виробу	Об'єм, мл	Етикетка	Стерильність	Пакування
1	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16x100 мм, конічне дно, 10 мл, з градуванням	10	-	-	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
2	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16x100 мм, конічне дно, 10 мл, без градування	10	-	-	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
3	Пробірка циліндрична "ВОЛЕС" 16x100 мм, кругле дно, 10 мл, з градуванням	10	-	-	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
4	Пробірка циліндрична "ВОЛЕС" 16x100 мм, кругле дно, 10 мл, без градування	10	-	-	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
5	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16x100 мм, конічне дно, 10 мл, з градуванням, з пробкою	10	-	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
6	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16x100 мм, конічне дно, 10 мл, без градування, з пробкою	10	-	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
7	Пробірка циліндрична "ВОЛЕС" 16x100 мм, кругле дно, 10 мл, з градуванням, з пробкою	10	-	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
8	Пробірка циліндрична "ВОЛЕС" 16x100 мм, кругле дно, 10 мл, без градування, з пробкою	10	-	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
9	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, з градуванням, з пробкою та етикеткою, стерильна	10	+	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
10	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, без градування, з пробкою та етикеткою, стерильна	10	+	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.



11	Пробірка циліндрична "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, з градуванням, з пробкою та етикеткою, стерильна	10	+	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
12	Пробірка циліндрична "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, без градування, з пробкою та етикеткою, стерильна	10	+	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
13	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, з градуванням, з пробкою та етикеткою	10	+	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
14	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, без градування, з пробкою та етикеткою	10	+	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
15	Пробірка циліндрична "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, з градуванням, з пробкою та етикеткою	10	+	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
16	Пробірка циліндрична "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, без градування, з пробкою та етикеткою	10	+	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
17	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, з пробкою	10	-	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.
18	Пробірка циліндрична "ВОЛЕС" 16x100 мм, 10 мл, з пробкою	10	-	+	Упаковка 200 шт.; транспортна коробка – 2400 шт.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.


Не використовувати не за призначенням

Використання:

1. Вибрати пробірку, відповідно необхідного типу дослідження.
2. Помістити досліджуваній матеріал всередину пробірки, далі використовувати пробірку відповідно до поставлених завдань.
 - При використанні як ємність для зберігання або транспортування зразка. Слід закрити пробірку пробкою або кришкою для запобігання втрати зразка.

- На аналітичному етапі дослідження пробірку використовують для проведення пробопідготовки, постановки реакції або безпосереднього вимірювання в аналізаторі як ємність зручної форми для візуалізації протікання реакцій і процесів.
3. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:

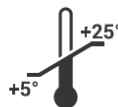

На стерильному виробі присутнє ще маркування стерилізації: або методом радіації або етилен оксидом.

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Виробник:



Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.

Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China Jiangsu

Джіангсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД,

адреса: Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду

02.12.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.