



UA.TR.099

Дзеркало носове "ВОЛЕС" (розмір М) одноразового використання стерильне

Інструкція по використанню

Призначення:

Дзеркало носове одноразового використання стерильне - призначене для лікаря отоларинголога для проведення комплексних профілактичних оглядів та лікувальних процедур. Дзеркало носове застосовується при оглядах в риноскопії, орorafарингоскопії, отоскопії.

Опис виробу:

Носове дзеркало складається із двох подібних частин, котрі мають механічне з'єднання. Виготовлене з ABS пластику, кінці виробу закруглені та атравматичні.

Металева пружина з'єднання має довжину – 30 мм

Голівка – довжина 27 мм

Дзеркало носове одноразового використання - стерильне, в індивідуальній упаковці.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень у використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:


Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням.

Спосіб використання:

1. Перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.
2. Обробіть руки антисептиком та надягніть рукавички.
3. Розкрийте упаковку, в зазначеному місці, дістаньте набір.
4. Огляньте ніс ззовні.
5. За допомогою носового дзеркала розведіть стінки носа та проведіть огляд.
6. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:

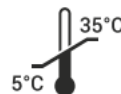

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

04120, Україна, м.Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1
тел: +38 (044) 581-11-42, +38 (044) 581-11-43
www.steklopribor.com



Виробник:

JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

Xinqiao Road, Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou, 225109 Jiangsu, China

ДЖІАНГСУ ЯДА ТЕЧНОЛОГІ ГРОУП КО.,ЛТД

Ксінкiao Рoad, Тоукiao Тоун, Гуанглінг Дістрікт, Янгжоу, 225109 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Тел.: (044) 581-11-38.

e-mail: sale@voles.com.ua, сайт: voles.com.ua

Дата останнього перегляду
02.01.2018

Директор
ТОВ «ТД «Віктер Плюс»



Лозінська О. М.