



UA.TR.099

Набір отоларингологічний оглядовий №2 "ВОЛЕС" одноразового використання стерильний

Інструкція по використанню

Призначення:

Набір отоларингологічний одноразовий стерильний - призначений для лікаря отоларинголога для проведення комплексних профілактичних оглядів та лікувальних процедур. Лор набір застосовується при оглядах в риноскопії, орофарингоскопії, отоскопії.

Опис виробу:

Склад набору оториноларингологічного оглядового одноразового:

дзеркало носове - 1 шт.;

воронка вушна - 2 шт.;

шпатель отоларингологічний пластиковий - 1 шт;

серветка – 1 шт.;

аплікатор – 4 шт.

Носове дзеркало складається із двох подібних частин, котрі мають механічне з'єднання. Виготовлене з ABS пластику, кінці виробу закруглені та атравматичні.

Металічна пружина з'єднання має довжину – 30 мм

Голова – довжина – 27 мм

Воронки вушні виготовлено з чорного ABS пластику. Закруглений кінець – виключає ризик пошкодження тканин. Розміри воронок: S (отвір 4 мм) та L (отвір 4,6 мм).

Шпатель пластиковий, плоский, з закругленими кінцями, підсилений. Виготовлений з білого РР/Поліпропілену. Вигнутий тип, довжина вигнутої частини – 30 мм

Розмір шпателя: 177x18x2 мм

Набір стерильний, в індивідуальній упаковці.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням.

Спосіб використання:

1. Перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.
2. Обробіть руки антисептиком та надягніть рукавички.
3. Розкрийте упаковку, в зазначеному місці, дістаньте набір.
4. Огляньте ніс з зовні.
5. За допомогою носового дзеркала розведіть стінки носа та проведіть огляд.
6. Проведіть огляд порожнини рота, за допомогою шпателя.
7. Огляньте вухо ззовні.
8. Використовуючи лобний рефлексор, введіть вушну воронку в слуховий прохід та проведіть необхідні маніпуляції.
9. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.



Виробник:

JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD
Xinqiao Road, Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou, 225109 Jiangsu, China

ДЖІАНГСУ ЯДА ТЕЧНОЛОГІ ГРОУП КО.,ЛТД
Ксінкiao Рoад, Тоукiao Тоун, Гуанглінг Дістрікт, Янгжоу, 225109 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»,
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.
Тел.: (044) 581-11-38.
e-mail: sale@voles.com.ua, сайт: voles.com.ua

Дата останнього перегляду
02.01.2018

Директор
ТОВ «ТД «Віктер Плюс»



Лозінська О. М.