



Сечоприймач «ВОЛЕС» 750 мл з отвором для зливу



UA.TR.099

Інструкція по використанню

Призначення

Сечоприймач призначений для збору сечі.

Опис виробу:

- виготовлений з прозорого полівінілхлориду, що дозволяють контролювати колір і діурез вмісту
- довжина трубки 38+/-2 см
- є клапан для запобігання зворотньому відтоку сечі з зливним клапаном
- перехідник сечоприймача стійкий до перегинів
- є 4 отвори для кріплення сечоприймача
- нанесена шкала від 50 до 750 мл
- ціна поділки 50 мл

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Для одноразового використання, не підлягає дезінфекції і стерилізації.

Не залишати сечоприймач прикріпленим більше години. Якщо протягом години не вдалося зібрати сечу - необхідно зняти сечоприймач і прикріпити новий.

Не використовувати не за призначенням.

Спосіб використання:

- перевірити цілісність упаковки і термін придатності виробу
- закрити зливний клапан
- закріпити сечоприймач на ліжку чи стойці, використовуючи отвори для кріплення сечоприймача з допомогою зав'язок, крічків чи інших пристосувань
- зняти ковпачок з конічного конектора для катетеру
- приєднати конектор до катетера
- при наповненні мішку виміряти обсяг сечі, відкрити хрестоподібний кран таким чином, щоб вертикальна частина крана була відкрита горизонтальною частиною крану
- після випорожнення мішку закрити випускний клапан
- обробка та утилізація в установленому порядку після використання.

Умовні позначки

	Зберігати в сухому місці
	Серія
	Дата виробництва



	Використати до
	Для одноразового застосування
	Стерилізовано оксидом етилену
	Ознайомтеся з інструкцією перед застосуванням

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.



Виробник:

JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No.56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China

ДЖІАНГСУ КАНГДЖІН МЕДІКАЛ ІНСТРУМЕНТ ЛО., ЛТД.

№56 Чангженг Род, Донгшу віллаге, Женглу Тоун, Вуджін Дістрікт, Чангжоу Сіті, Джіангсу Провінсе, 213111, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Тел.: (044) 300 05 04.

Дата останнього перегляду
01.04.2021 року

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О.Л.